


## SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

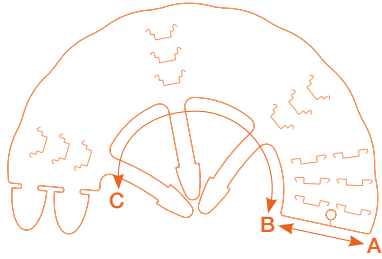

### Système d'attache rapide et sécurisé par un double passage des languettes.

- 3 à 5 réglages autour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support.
- Encres de marquage conformes aux normes FDA, non toxiques pour l'animal.

### MONTAGE

Engager les languettes latérales (les plus épaisses) dans les découpes choisies, côté lisse à l'intérieur, **puis les faire ressortir dans les découpes suivantes.**


Faire la même chose avec les petites languettes.




### DÉMONTAGE

Bien plier (marquer fermement le pli) le volet mobile qui dépasse après le montage.

Faire ressortir les languettes des découpes en tirant.

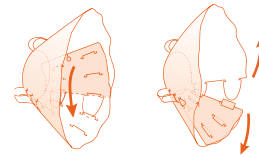

## SYSTÈME D'ATTACHE STANDARD

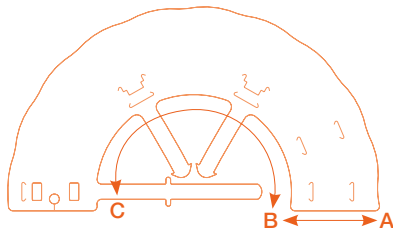

### Système d'attache classique sécurisé, une attache solidaire du carcan de l'animal, les autres se fixant individuellement sur le collier.

- 2 à 3 réglages autour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support.
- Encres de marquage conformes aux normes FDA, non toxiques pour l'animal.


### MONTAGE

Placer la face perforée sur le dessus, côté lisse à l'intérieur.

Faire glisser la grande languette dans la découpe choisie.

Passer dessus-dessous.

Procéder de la même manière avec les petites languettes.

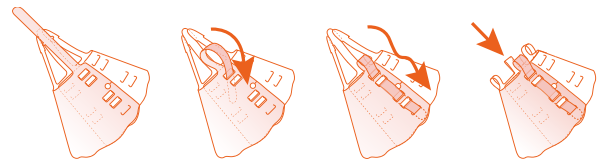


### DÉMONTAGE

Tirer la languette.



## SYSTÈME D'ATTACHE SCRATCH

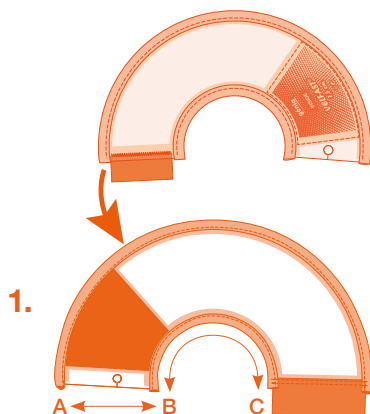

1.


### MONTAGE

Positionner le Velfast® pour que l'inscription « inside » se retrouve sur la peau de l'animal (1).

Ajustez le Velfast® autour du cou de l'animal, vous devez pouvoir passer facilement un doigt entre le carcan et la peau (2).

Superposez et collez les bandes auto-agrippantes en utilisant toute la surface disponible, sans la dépasser (3).

2.

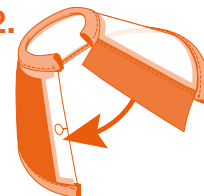

3.

