

Omnifix® Elastic

Non-woven fixatievlies

Het fixatievlies Omnifix® Elastic is bedoeld voor het fixeren van grote verbandoppervlakken. De papieren drager van de tape is voorzien van een raster, zodat de benodigde hoeveelheid gemakkelijk kan worden afgemeten. Het vlies kan beweeglijkheid mogelijk maken of juist voorkomen. Dat komt, omdat het vlies slechts in één richting elastisch is.

Eigenschappen

Omnifix® Elastic is doorlaatbaar voor lucht en vocht, wat betekent dat het zeer huidvriendelijk is en maceratie van de huid voorkomt. De tape waarborgt een stevige fixatie, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat geen kleverige resten achter op de huid. Omnifix® Elastic absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd. Omnifix® Elastic is dwarselastisch en soepel en kan daardoor bijvoorbeeld ook op gewrichten rimpelloos worden bevestigd. Het weefsel geeft niet mee in de lengte, dus het is van belang dat het vlies in de juiste richting wordt bevestigd. Zo kan enerzijds een goede mobiliteit worden gewaarborgd, maar kan beweeglijkheid ook worden tegengegaan door het fixatievlies in de andere richting aan te brengen. Indien nodig kan zo voor stabiliteit worden gezorgd. Het dragerpapier aan achterkant is voorzien van golfvormige insnijdingen, zodat het gemakkelijk te verwijderen is.

Materiaal

100% polyesterweefsel met een hypoallergene kleeflaag op basis van synthetisch rubber, zonder colofonium of latex. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging

Ter bescherming van verbanden of voor het vastzetten van verbanden met een groot oppervlak op allerlei medische gebieden. Bevestiging op gewrichten, conische en ronde lichaamsdelen. Vastzetten van meetinstrumenten, sondes, katheters en dergelijke.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijsseenheid	Verzendeenheid	CNK
Omnifix® Elastic. Per stuk, in doos	10 cm x 2 m	900 601	1 stuk	64 x 1 stuk	1462845
	5 cm x 10 m	900 602	1 stuk	63 x 1 stuk	1462852
	10 cm x 10 m	900 603	1 stuk	36 x 1 stuk	1462860
	15 cm x 10 m	900 604	1 stuk	24 x 1 stuk	1462878
	20 cm x 10 m	900 605	1 stuk	18 x 1 stuk	1462886

Instructies voor het fixeren

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het fixatievlies.

Voordelen:

- Voor het fixeren van grote oppervlakken
- Op maat te knippen
- Betrouwbare fixatie
- Eenvoudig in gebruik
- Hoeft voor een röntgenonderzoek niet te worden verwijderd
- Bevat geen colofonium of latex