



UMONIUM³⁸ MASTER TISSUES

Une lingette de 20 x 20 cm
permet de traiter une surface
de 3 m².



✓ FORMULE SANS
→ COMPOSANT CMR*
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

DOMAINES D'APPLICATION

- Mobiliers, surfaces hautes et basses
- Equipements sanitaires
- Chaussures, bottes et lunettes ayant été en contact avec des éléments contaminants

COMPOSITION

Lingettes blanches non tissées (20 cm x 20 cm) composées de 50% pulpe de bois et 50% polyester et imbibées d'une solution d'UMONIUM³⁸ MASTER: Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) 11,9g/L.

STANDARDS NORMATIFS

- L'activité bactéricide, fongicide et sporicide de la lingette imbibée est validée selon les normes ASTM 2967-15 et EN 16615
- L'activité bactéricide, fongicide, lévuricide, mycobactéricide et virucide de la solution d'imprégnation est validée selon les normes EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 et EN 14476
- Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001:2015
- Conforme au règlement biocide 528/2012

MODE D'EMPLOI

Nettoyage/Pré-désinfection: utiliser une lingette parfaitement humide, frotter la surface de telle manière à éliminer toute trace visuelle de matière organique.


Désinfection: répéter l'opération sur une surface visuellement propre en respectant un temps de contact de minimum 5 secondes, ne rincer à l'eau potable que si nécessaire, laisser sécher.



PROPRIÉTÉS

- Biocide PT2
- Lingette détergente - désinfectante à large spectre d'activité
- Non toxique: DL₅₀ (rat 5840 mg/kg), aucune vapeur dangereuse
- Non corrosif: pH neutre
- Produit prêt à l'emploi non irritant pour la peau (aucune toxicité transdermique)
- Sans aldéhyde, peroxyde, biguanide ou autre composant carcinogène, mutagène, reprotoxique
- Non coagulant
- Ininflammable
- Activités bactéricide, fongicide et sporicide
- 100% compatible sur fibre optique, caoutchouc, polycarbonate, composé acrylique, verre, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, néoprène, latex, silicone, peintures, acier inox 410
- Efficace, rapide et performant (dissout le sang)
- Efficace en présence de matières organiques
- Agit dès 5 secondes
- Rémanent sur la surface non rincée (film bactériostatique)
- Sans résidu après rinçage
- Stabilité: 36 mois date de fabrication

PROCÉDURE D'UTILISATION

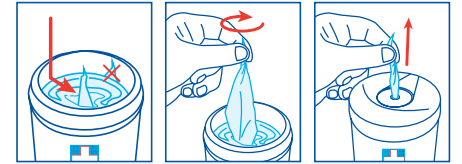

ÉTAPE 1 : NETTOYAGE/PRÉ-DÉSINFECTION



Prendre une lingette et procéder à l'essuyage humide

Si surfaces visuellement propres, passer à l'étape 2

ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION



Prendre une nouvelle lingette et procéder à l'essuyage humide



Temps de contact min. 5 sec.

Rincer à l'eau potable si nécessaire*

* Pour les objets (tels que les jouets) susceptibles d'être mis en bouche par les enfants

ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
PF 10750	Boîte de 100 lingettes (20 x 20 cm)	6 x 100

* Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique

FP00410 FR - Ed. 3.2 - 01/2022 - Photos produits non contractuelles.



UMONIUM³⁸ est une marque déposée du Laboratoire Huckert's International