


**ECOLAB**<sup>®</sup>

**Sekusept<sup>®</sup> aktiv**



Instrumentendesinfectiemiddel  
op basis van perazijnzuur met  
reinigende werking



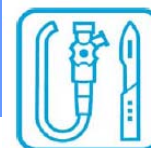

## Voordelen

- Volledig spectrum
- Veilig voor de gebruiker
- Universeel bruikbaar voor alle instrumenten, in het bijzonder voor flexibele endoscopen
- Uitstekende reinigende werking, ook bij sterke vervuiling
- Korte inwerktijd
- Lage toepassingsconcentratie



## EIGENSCHAPPEN

- Werkzaam tegen HBV, HIV en de DVV-virussen (Adeno, Papova, Vaccinia, Polio)
- Brede materiaalverdraagzaamheid
- Schuimarm
- Volledig oplosbaar granulaat
- Teststrookjes ter controle van de activiteit
- Geschikt voor ultrasoonbaden

## TOEPASSINGSGEBIED

Desinfectie en reiniging van medische instrumenten zoals flexibele endoscopen, instrumentarium vervaardigd uit nikkel – chroom staal en rubber – plastic materialen voor anesthesie, urologie en chirurgie.

Tevens geschikt voor dentale prothesen. Niet geschikt voor instrumenten vervaardigd uit messing of koper of mechanisch bewerkte instrumenten van chroom of nikkel.

## SAMENSTELLING

30% zuurstofbleekmiddel, <5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

Op basis van perazijnzuur  
Bevat parfum

## INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier en MSDS-fiche zijn verkrijgbaar op aanvraag.

## VERPAKKING / REFERENTIE

Bidon 6 kg - verp. : 1 x 6 kg  
Ref. : 3050570

### Teststrookjes voor Sekusept® aktiv :

Verp. : 4 x 50 stuks – ref. : 3007370

## GEBRUIKSAANWIJZING

Bij het aanmaken van de 2 %-oplossing, gebruik maken van de ingesloten maatbeker van 150 ml (30 ml = 20 g). Neem de nodige hoeveelheid water, voeg 20 g Sekusept® aktiv per liter water toe en roer meerdere malen de oplossing. Het instrumentarium en anesthesiemateriaal in de oplossing leggen en zorgen voor volledige onderdompeling. Na 15 min. de instrumenten uit de oplossing nemen en met water van minstens drinkwaterkwaliteit (beter is nog gedestilleerd water of gedemineraliseerd water) < 30°C afspoelen. De oplossing dagelijks verversen.

Bij zwaar vervuilde oplossingen of bij zeer hoge temperaturen kan men de werkzaamheid van de oplossing controleren d.m.v. Sekusept® aktiv teststrips.



**Ecolab Healthcare**

**Clean. Safe. Healthy.**

Ecolab. BVBA/SPRL  
Z.3. Doornveld 164, 1731 ZELLIK  
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70  
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com

Microtek Medical BV, A Division of Ecolab  
Hekkehorst 24, 7207 BN ZUTPHEN (NL)  
Tel : 31 575.599.200