

## Voor gebruik in combinatie met een SELEKT Pomp

De SELEKT pomp is licht, robuust en makkelijk in gebruik. Hij wordt geleverd met 13- en 16-mm slangen die met een adapter aan de pomp kunnen worden gemonteerd. De pomp kan worden gebruikt voor het toedienen van vloeistoffen in de maag en het leegpompen van de maag by het behandelen van ileus.

### Deze set bevat de volgende onderdelen:

- 1 x 16 mm kliksysteem neus-maagslang (vrouwelijk)
- 1 x 13 mm kliksysteem neus-maagslang (vrouwelijk)
- 1 x adapter (mannelijk) voor bevestiging aan de SELEKT Pomp
- 1 x dubbele adapter (mannelijk) voor optioneel gebruik als mondstuk

### GEBRUIKSAANWIJZING

**1.** Schroef het bovenste verbindingstuk van de pomp af.



**2.** Terwijl u de pomp met de witte pakking naar boven houdt, plaatst u de adapter(mannelijk) bovenop de pakking met de zwarte sluitring naar boven.



**3.** Schroef het bovenste verbindingstuk weer stevig op de pomp terug.



**4.** Neem de neus-maagslang aan de kant die voorzien is van het kliksysteem(vrouwelijk) en duw deze op het mannelijk deel dat uitsteekt op het bovenste verbindingstuk.



**5.** Als het noodzakelijk is om door de slang te blazen terwijl het paard geïntubeerd wordt, sluit dan de dubbele adapter (mannelijk) aan op de kant van de neus-maagslang voorzien van het kliksysteem (vrouwelijk), om deze als mondstuk te gebruiken. Als u de maagslang al aan de pomp heeft bevestigd, dient u deze te verwijderen door de bovenste ring (kraag) van het kliksysteem (vrouwelijk) van de pomp te trekken.

Indien u vragen heeft over het gebruik van deze maagslang set, neem dan a.u.b. contact op met Nimrod Nederland B.V.