

SELEKT®

Tips voor veilig drenchen bij schapen en geiten

- Check altijd uw SELEKT materiaal voor gebruik; Een klein gaatje of beschadigingen aan het mondstuk of slang kan al voor problemen zorgen, zoals slokdarmbeschadigingen of verslikking.

- Schuif het bandje wat aan het mondstuk bevestigd zit om de nek en doe het mondstuk in de bek van het schaap of de geit. Door het bandje aan te trekken met de koordsluiting, wordt het mondstuk meer gefixeerd.



- Nu kunt u de zachte siliconen slang door het mondstuk schuiven. Probeer dit rustig te doen, zodat het dier de kans heeft om de slang door te slikken. Voor ernstig verzwakte dieren kan dit lastig zijn dus controleer bij hen extra goed of de slang op de juiste plaats zit.

- Het controleren van de plaatsing van de slang kan op verschillende manieren:
 - U kunt in de hals voelen of u de slang in de slokdarm voelt zitten, doordat er 2 slangen voelbaar zijn. Dit is het meest betrouwbaar.
 - U kunt controleren of u een ademhaling uit de slang voelt komen. Als de slang in de slokdarm zit kunt u uiteraard geen ademhaling voelen.
 - U kunt op de slang blazen en luisteren of u een borrelend geluid hoort

- Koppel de Selekt mini-drencher aan de Selekt pomp en start het drenchen. Doe dit rustig. Indien alle vloeistof ingegeven is, pomp dan lucht door om ervoor te zorgen dat de overgebleven vloeistof in de slang ook in de pens komt en niet in de longen kan komen bij het terug halen van de slang.



- Gebruik geen Selekt Fresh Cow en Off Feed tegelijk in 1 drenchbehandeling i.v.m. het hoge gehalte Calcium.
- Gebruik de aangegeven dosering op de andere zijde van deze kaart. Er zijn emmertjes en maatschepjes beschikbaar om aangebroken zakken te bewaren en nauwkeurig te kunnen doseren.
- Gebruik altijd handwarm water; ook al heeft het dier koorts. Koud water opwarmen kost namelijk energie, wat het herstel kan vertragen.